

ACCU-CHEK® Safe-T-Pro Uno


05888662, 06372481

UK Стерильний одноразовий пристрій для проколювання Акку-Чек Сейф-Т-Про Уно

Перед взяттям крові за допомогою одноразового пристрою для проколювання ознайомтеся з цією інструкцією із застосування.

У даній інструкції використовуються такі 2 символи:

 Цей символ вказує на можливість травмування або заподіяння шкоди Вашому здоров'ю.

 Цей символ звертає Вашу увагу на важливу інформацію.

Призначення

Стерильний одноразовий пристрій для проколювання призначено для взяття капілярної крові з кінчика пальця або з п'яти (у дітей до 1 року).

Компоненти одноразового пристрою для проколювання (див. мал. 1)

1 Опис

a Кнопка спуску

b Корпус

c Ковпачок забезпечення стерильності голки

Завдяки особливому заточуванню й малому діаметру голки (Ø 0,36 мм, 28 G) цей пристрій для проколювання забезпечує майже безболісне взяття крові у пацієнтів.

Ковпачок забезпечує **стерильність** голки.

Підготовка до взяття крові

2 Діти віком до 1 року

У дітей віком до 1 року взяття капілярної крові здійснюється з п'яти. Взяття крові можна робити лише з зовнішніх бокових поверхонь ступні (див. чорні зони на мал. 2).

Проколювати шкіру ступні можна тільки вертикально (див. стрілки на збільшеному зображенні). Під час взяття крові дитину слід тримати так, щоб її ноги звисали вертикально вниз. Не можна проколювати одне й те саме місце кілька разів.

Для покращення циркуляції крові можна обережно зігріти п'яту дитини перед взяттям крові, наприклад обгорнувши її теплою вологою тканиною (не більше 42 °C).

Вимийте п'яту дитини теплою водою з милом, а потім добре ополосніть. Продезінфікуйте п'яту за допомогою серветки, змоченої спиртом. Після цього п'яту потрібно витерти насухо.

3 Діти старше 1 року та дорослі


Рекомендовано взяття капілярної крові з бокових поверхонь кінчиків пальців, оскільки в цих місцях больові відчуття найнижчі. Проколювати можна будь-який палець (див. чорні зони на мал. 3).

Руки пацієнта необхідно вимити теплою водою з милом і добре сполоснути. Після цього руки потрібно витерти насухо. Це допоможе уникнути забруднення в місці проколювання та покращити циркуляцію крові. У разі додаткового використання змочених спиртом серветок палець має повністю висохнути перед продовженням процедури.

Взяття крові

4 Зняття ковпачка забезпечення стерильності

▶ Поверніть ковпачок забезпечення стерильності на чверть оберту, а потім зніміть його (див. мал. 4).




 Не використовуйте одноразовий пристрій для проколювання, якщо ковпачок забезпечення стерильності вже знято.

5 + 6 Взяття крові


▶ Тримайте одноразовий пристрій для проколювання середнім, указівним і великим пальцями (див. мал. 5).


▶ Розташуйте одноразовий пристрій для проколювання в місці проколювання і щільно притисніть його.

▶ Великим пальцем натисніть кнопку спуску до упору (див. мал. 6).

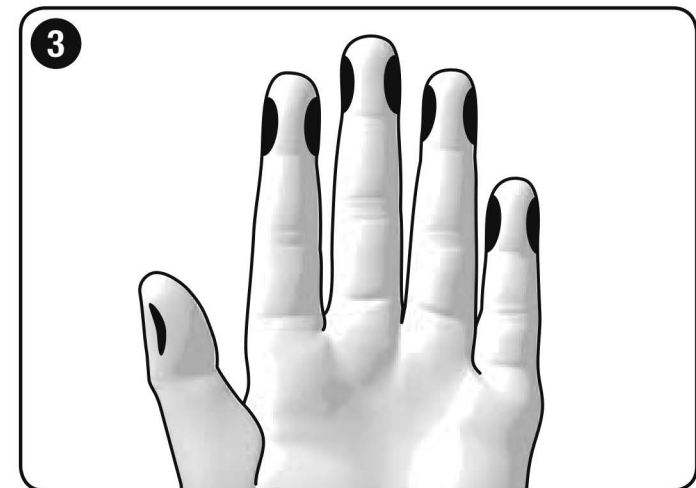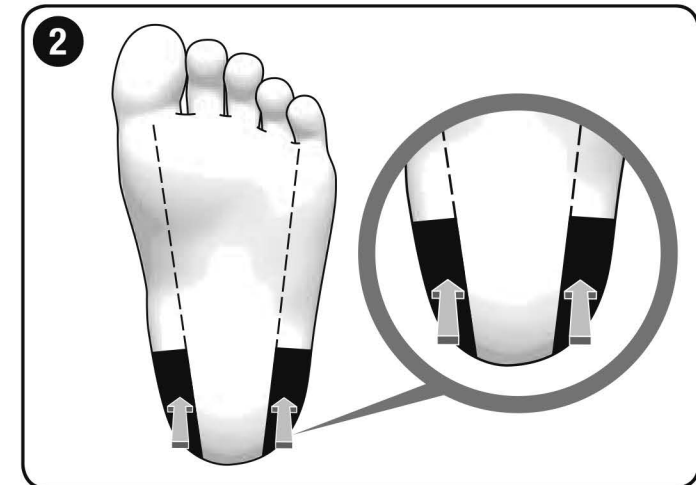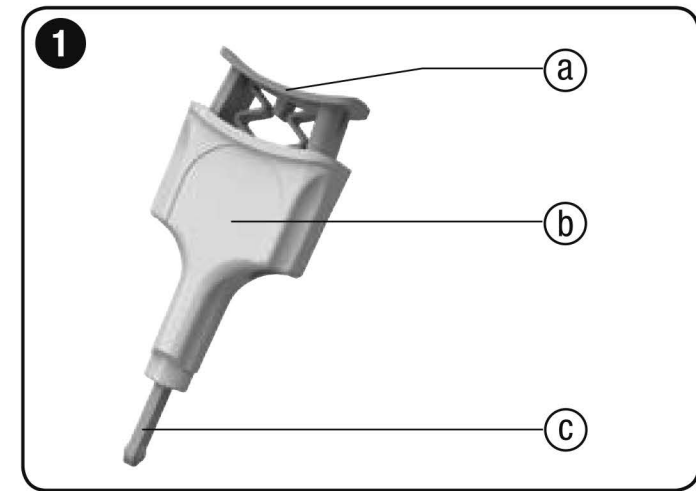

- ▶ Приберіть одноразовий пристрій для проколювання з місця проколювання.
- ▶ Зачекайте, доки з місця проколювання не вийде крапля крові.
- ▶ Формуванню краплі крові допоможе легке натискання на палець у напрямку кінчика пальця або легке натискання на п'яту.

 У деяких випадках діагностичних обстежень кінчик пальця або п'яту не можна сильно масажувати або стискати, тому що це може призвести до отримання хибних результатів.

 Завжди утилізуйте використані одноразові пристрої для проколювання відповідно до норм, що діють у Вашому закладі.

Дата останнього перегляду

2019-04

Уповноважений представник



Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Рош Україна»,
Україна, 03150, м. Київ,
вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх
E-mail: ukraine.accu-check@roche.com

Офіційний імпортер:

ТОВ «Діалог Діагностікс»,
Україна, 04205,
м. Київ, проспект Оболонський, 32.
Телефон гарячої лінії 0 800 300 540.
E-mail: info@dialogd.com

	Див. інструкцію із застосування
	Увага! Дотримуйтесь вказівок із техніки безпеки, наведених в інструкції із застосування для даного виробу.
	Лише для одноразового використання
	Використати до
STERILE R	Стерилізовано за допомогою опромінення
	Виробник
REF	Номер за каталогом
LOT	Код партії
GTIN	Глобальний номер товарної позиції
CE	Цей виріб відповідає вимогам Директиви Ради ЄС 93/42/ЄЕС щодо медичного обладнання.

CE 0123

ACCU-CHEK and SAFE-T-PRO are trademarks of Roche.

ACCU-CHEK, SAFE-T-PRO та АККУ-ЧЕК є торговими марками компанії Roche (Рош).

© 2019 Roche Diabetes Care



Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-check.com

«Рош Діабетес Кеа ГмбХ»,
Зандгофер Штрассе 116
68305, Мангайм Німеччина
www.accu-check.com

